

Chirurgische Maskers CE (x 50)



Normen

✓ EN14683

ALGEMENE INFORMATIE

■ **Omschrijving**

Chirurgisch anti-projectiemasker.

■ **Technische details**

Driemaal gevouwen, niet-geweven.

Plakt niet.

Neusstrip.

Twee elastieken voor ondersteuning achter de oren.

Bacteriële filtratie efficiëntie > 95%.

■ **Richtlijnen**

Het masker is voor eenmalig gebruik.

Het masker moet regelmatig vervangen worden.

■ **Toepassingen**

Bedoeld om de projectie van infectieuze agentia door druppels of door de lucht te vermijden bij het uitademen.

■ **Gebruiksmethode**

1. Trek het masker uit en breng het aan door het alleen bij de elastieken vast te houden.
2. Respecteer de toepassingsrichting met de strip aan de bovenkant van de neus.
3. Plaats de elastieken achter de oren.
4. Het masker moet goed uitgevouwen zijn. Bedek neus, mond en kin.
5. Eenmaal geplaatst, niet aanraken of herpositioneren tot verwijdering.
6. Na verwijdering, masker weggoien en handen wassen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Opslagtemperatuur: -20 °C en 40 °C.
Maximale vochtigheid bij opslag: 80%.

LOGISTIEKE INFORMATIE

📦 **Verpakking**



Karton

Hoogte (cm) : 9
Lengte (cm) : 19,5
Diepte (cm) : 10

📦 Netto gewicht (kg) : 0,18
📦 Bruto gewicht (kg) : 0,22



📦 **Omverpakking 1**



Karton

Hoogte (cm) : 39
Lengte (cm) : 61,5
Diepte (cm) : 42

📦 Netto gewicht (kg) : 12,2
📦 Bruto gewicht (kg) : 13,2



x 60.00

📦 **Omverpakking 2**



Pallet

Hoogte (cm) : 120
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 120

📦 Netto gewicht (kg) : 160
📦 Bruto gewicht (kg) : 177



x 720.00